


Guia “BOUGIE” para intubação traqueal

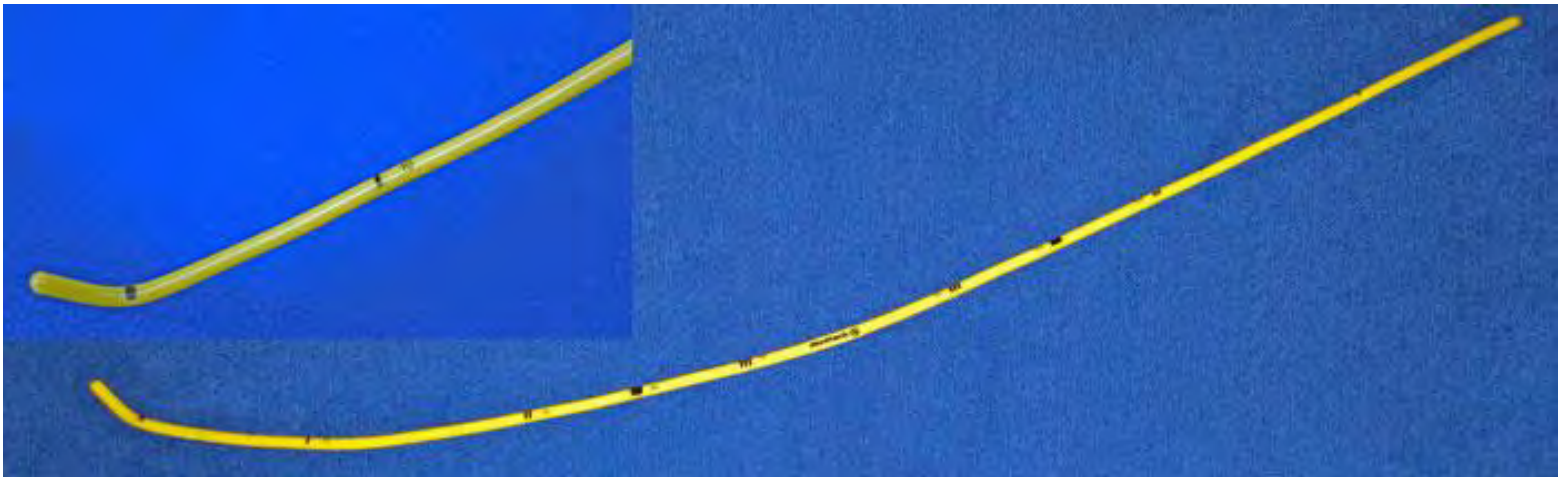

**Guia “BOUGIE” adulto
para uso com tubos endotraqueais 5,5 mm – 10,0 mm**

Guia “BOUGIE” para intubação traqueal

conformação distal
com ponta
macia e arredondada



facilita a inserção;
é menos traumática

ponta distal
com **formato angulado**



auxilia a passagem do guia
através das estruturas glóticas
em direção à traquéia

BOUGIE - uso com a extremidade curva



Guia “BOUGIE” para intubação traqueal


Detalhes
que fazem
diferença



Guia “BOUGIE” para intubação traqueal




Guia “BOUGIE” para intubação traqueal

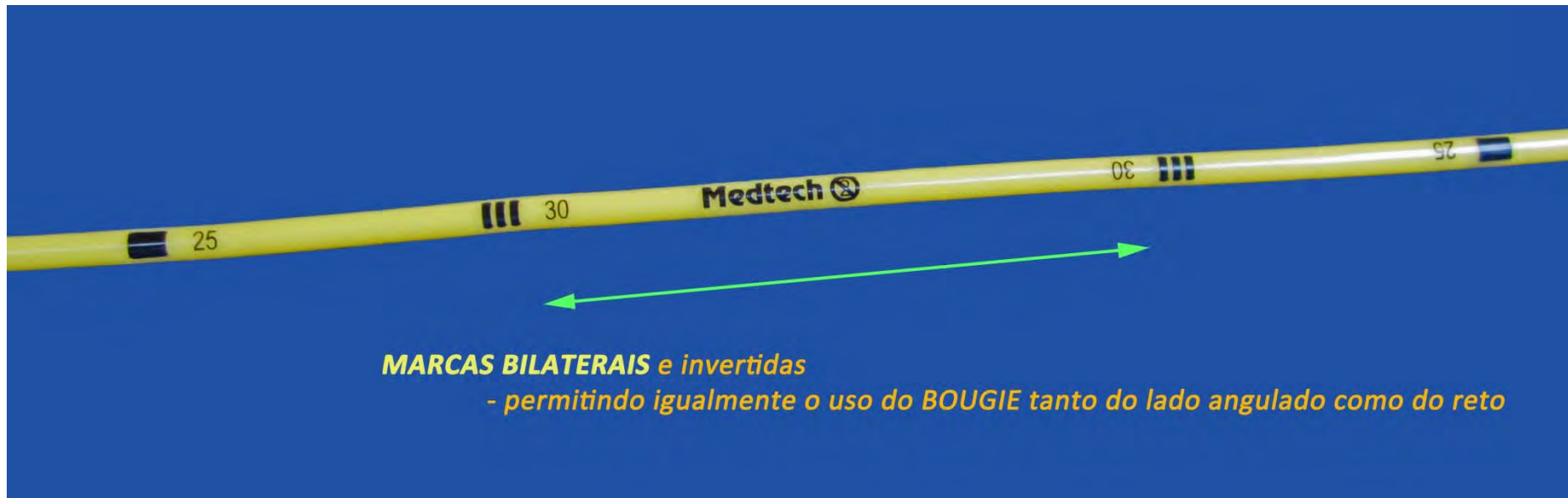

MARCAS BILATERAIS e invertidas

- permitindo igualmente o uso do BOUGIE tanto do lado angulado como do reto

Guia Tipo “BOUGIE” para intubação traqueal

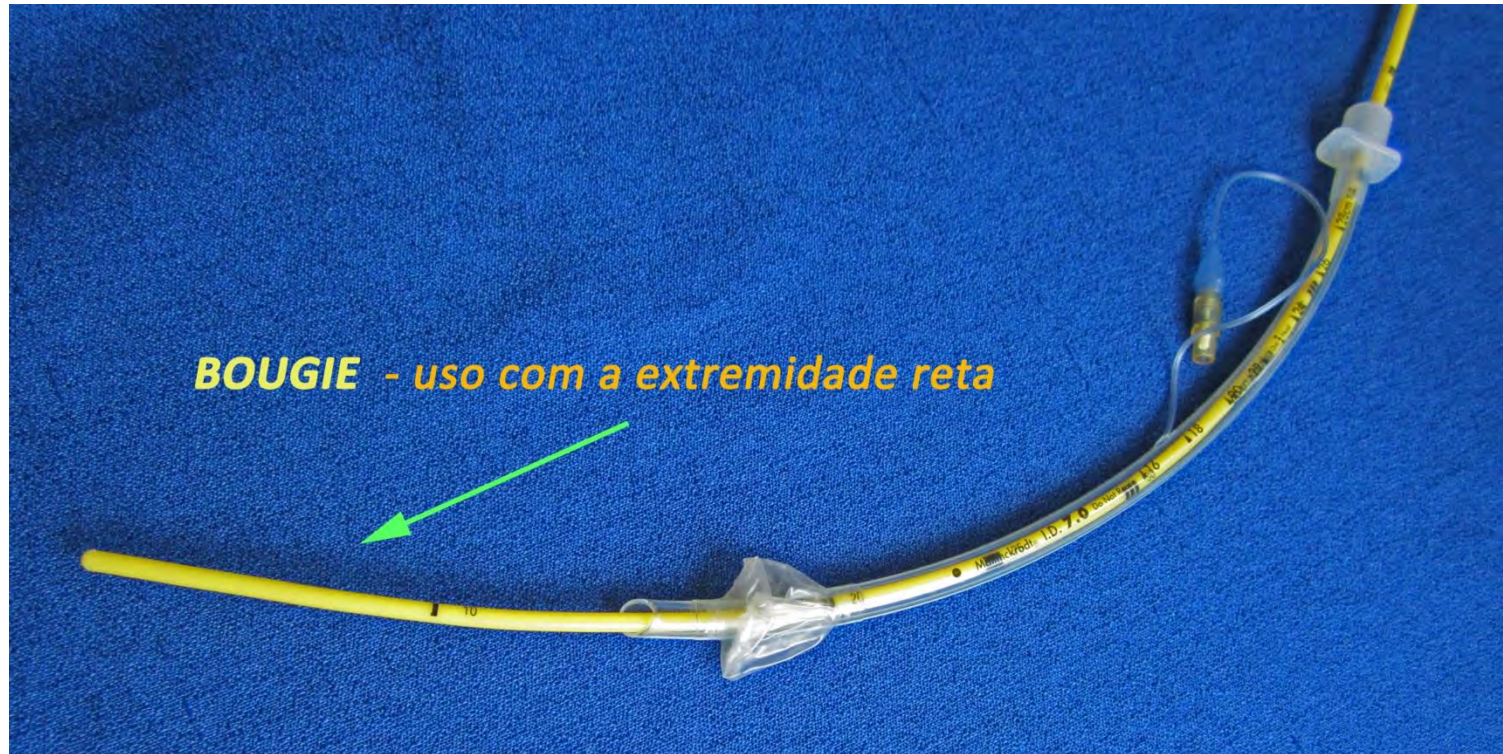

Quando utilizar o “BOUGIE”?

Indicações:

O guia *Bougie* tem sua aplicação tanto em situações de rotina como naquelas onde haja dificuldade para a exposição adequada da laringe através de laringoscopia (Via Aérea Difícil) e também em emergências da via aérea.

Onde *Bougie* é utilizado?

No ambiente hospitalar, em todos os setores do hospital onde se realiza intubação traqueal:

- centro cirúrgico, pronto socorro, UTI, ressonância magnética...

No atendimento pré-hospitalar:

- acidentes, serviços de resgate, ambulâncias...


Guia “BOUGIE” para intubação traqueal

Instruções de uso

1- verifique se o Guia “BOUGIE” pode ser movimentado livremente por dentro do tubo traqueal (TT) escolhido

2- realizar laringoscopia e obter a melhor visualização possível da abertura glótica

3- inserir o Guia “BOUGIE” com a extremidade angulada “para cima”, que é a conformação mais favorável para o acesso à glote


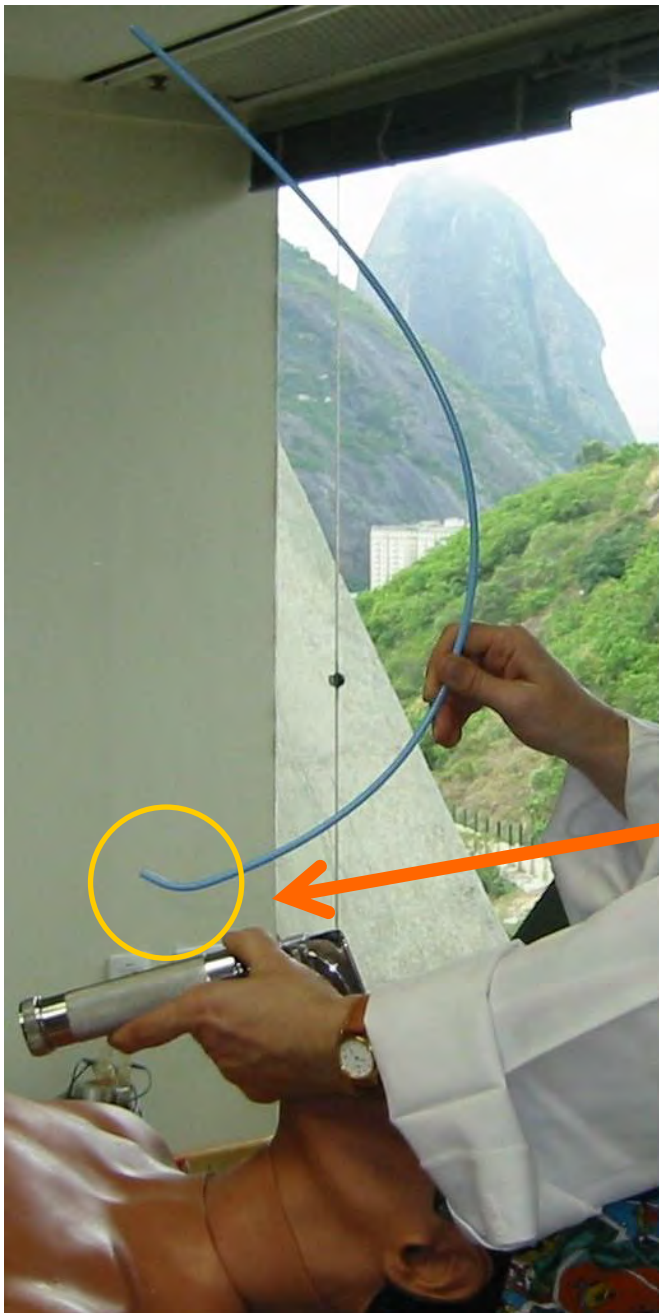


**Guia “BOUGIE” adulto
para uso com tubos endotraqueais 5,5 mm – 10,0 mm**



Guia “BOUGIE” para intubação traqueal

apresentação do guia

introdução do guia

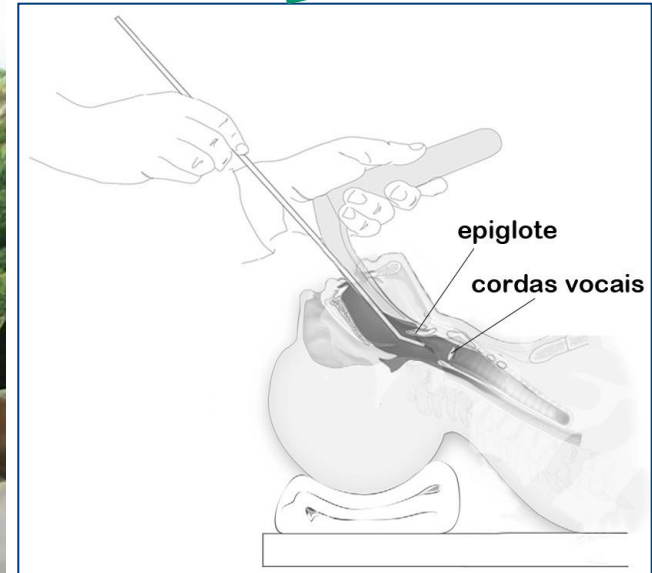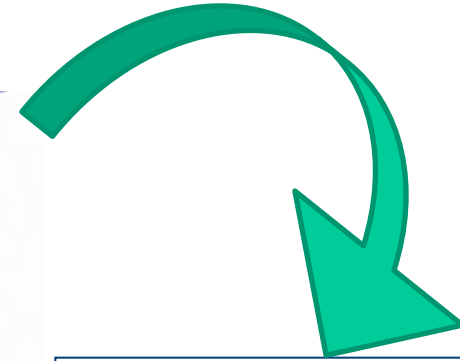

a ponta angulada do guia desliza por baixo da face posterior da epiglote

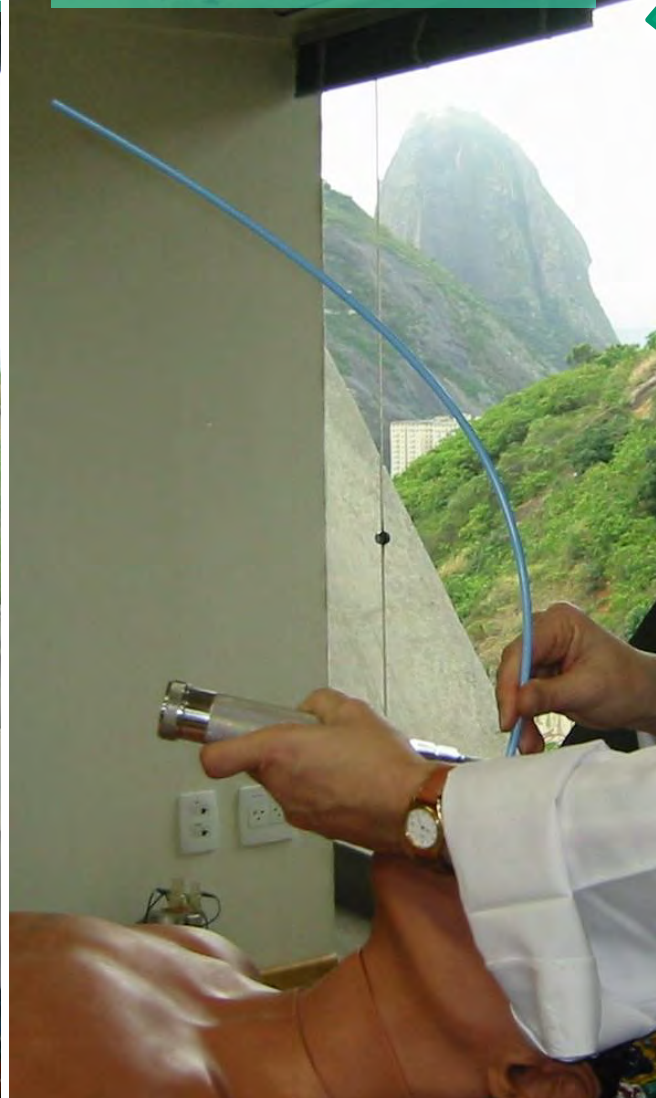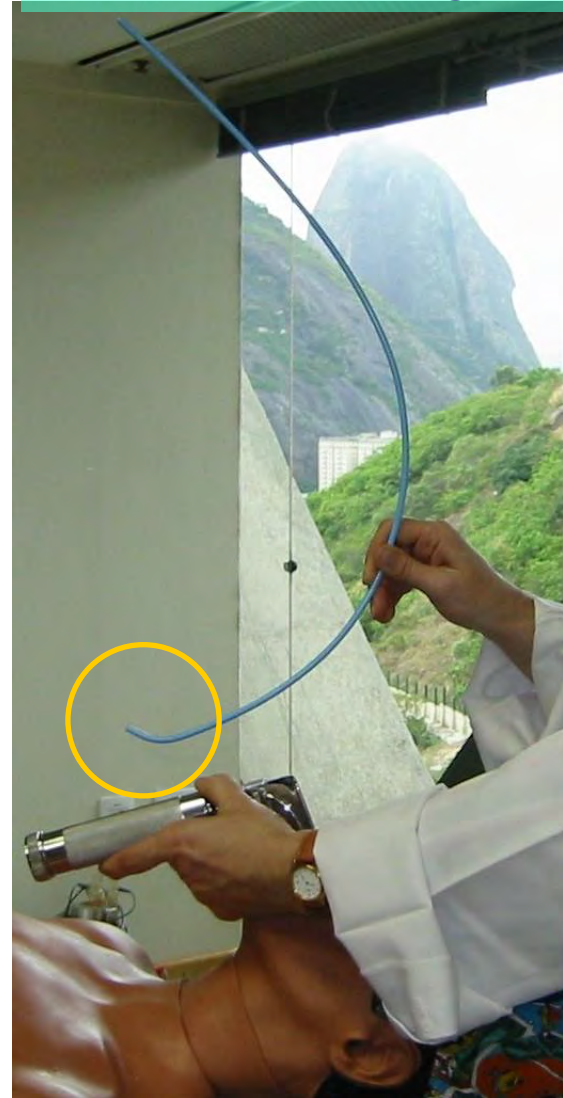


Guia “BOUGIE” para intubação traqueal

Instruções de uso



4- procure acompanhar visualmente o trajeto da ponta angulada do guia


Como saber se o Guia “BOUGIE” está inserido da traquéia?

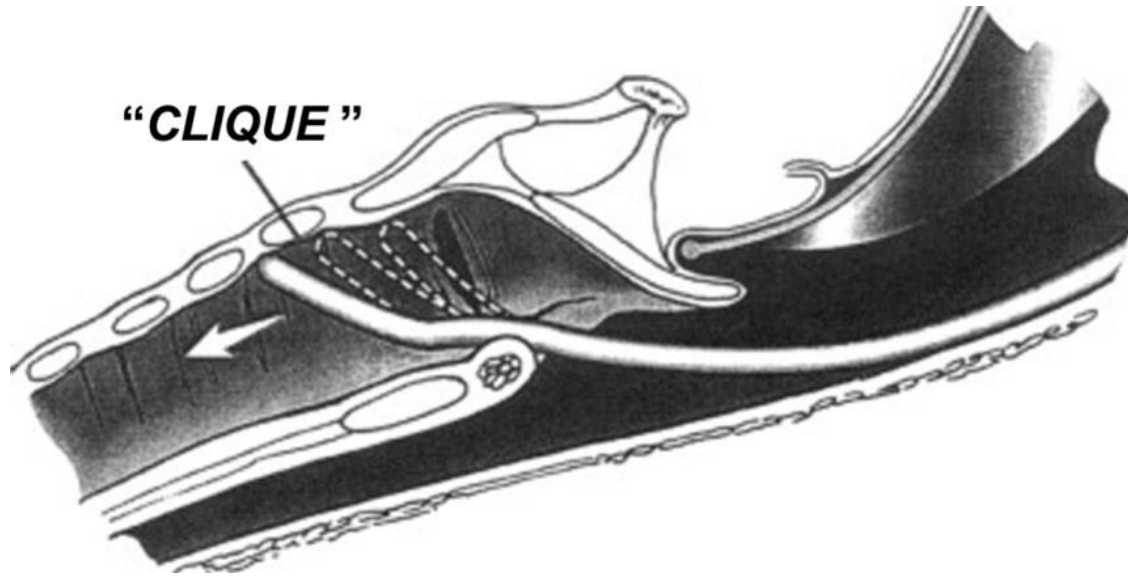

Quando o Guia “BOUGIE” ultrapassa a fenda glótica em direção a traquéia, muitas vezes é possível ao operador perceber uma sensação táctil quando sua ponta toca e em seguida “salta” alguns anéis traqueais neste trajeto.

Guia “BOUGIE” para intubação traqueal

Confirmado o posicionamento do guia “BOUGIE” na traquéia, manter a laringoscopia enquanto um assistente introduz o TT escolhido pela extremidade proximal do guia.

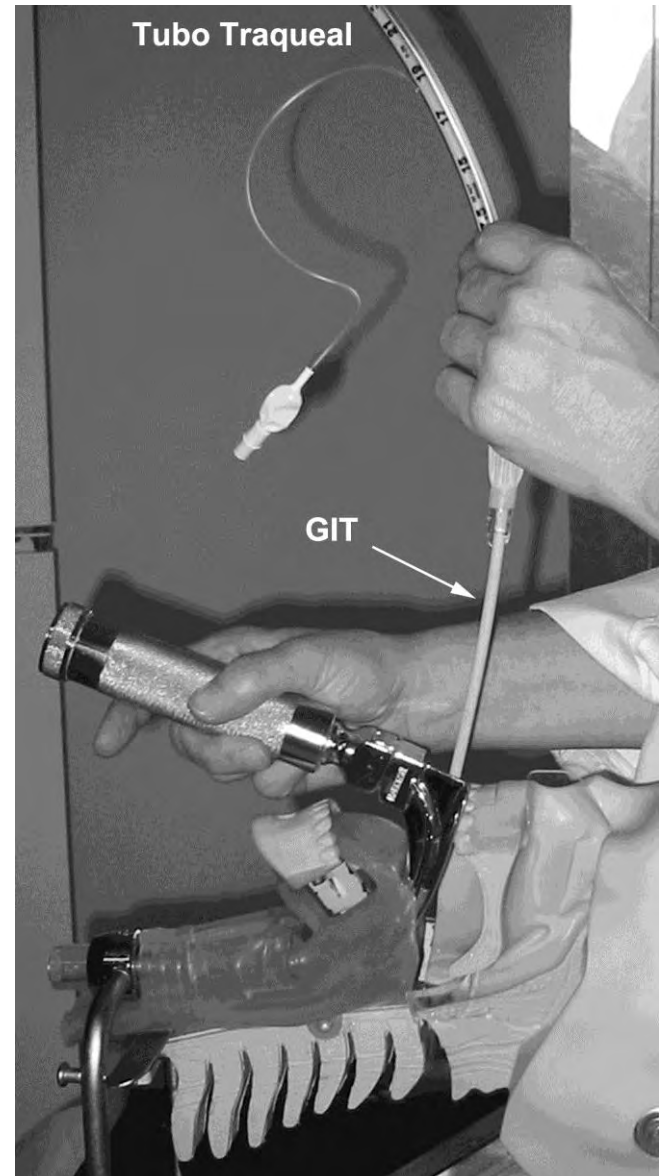

Guia “BOUGIE” para intubação traqueal

Deslizar cuidadosamente o TT sobre o guia até que o TT ultrapasse a laringe e atinja a luz traqueal.

A passagem do TT deve ser sempre suave e nunca forçada.

